

GABRIEL DROGTESZT 6 DRUGNOSTIC



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gyorsteszt az amfetamin, kokain, metamfetamin, ópiátok,
marihuána és ecstasy kimutatására.

REV. 2012-1.0KL



Gyártó



Csak egyszeri
használatra



Használati
utasításra
figyelni



2 darab tesztet
tartalmaz

CONT.

Tartalom

LOT

Nyilvántartási
szám



Lejáratú dátum



Tárolási
hőmérséklet



GYORSTESZT DROGOK KIMUTATÁSÁRA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEDVES VÁSÁRLÓ!

A drogtestt biztonságosan, egyszerűen, gyorsan és bárhol elvégezhető. Az útmutatóból megtudja, hogyan működik a legkülönbébb anyagok kimutatása egy modern tesztelési eljárással. Ezt az eljárást többek között a rendőrség is alkalmazza.

A drogtesttel a következőket tudja megvizsgálni:

- szilárd anyagok, pl. tabletták, hasis, marihuána növény, porok

- ampullában, vagy más tárolóeszközben levő folyadékok, melyek gyanús anyagokat tartalmazhatnak
- drogok minimális nyomai, melyek felületekhez (pl. bútorokhoz, használati tárgyakhoz) tapadva megmaradtak
- vizeletminták, melyek alapján kimutatható a drogfogyasztás

FONTOS INFORMÁCIÓK

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

- 1 használati útmutató
- 2 becsomagolt tesztkazetta
- 1 egyszer használatos pipetta fóliánként
- 1 folyadékot tartalmazó flakon

Szüksége lesz még egy órára, egyszer használatos kesztyűkre és vizeletminta esetén pohárra.

A hétköznapokban mindenki szembesül legális drogokkal (pl. alkohol, cigaretta). Sajnos elsősorban a fiatalok kerülnek egyre gyakrabban kapcsolatba olyan illegális anyagokkal, mint a kábítószer. Ami pedig csak egy kíváncsi kipróbálással kezdődik, gyakran végződik függőséggel. Mindenképp fennáll a függőség kockázata. Ennek sokféle oka lehet: bizonytalanság, hiányos konfliktuskezelő képesség, de kiválthatja a csoport kényszere, a barátokhoz való alkalmazkodás, vagy menekülés a mindennapi problémák elől. A kipróbálás és a függőség között nincs éles határ. Az ismertetőjegyek nagyon változatosak.

FONTOS INFORMÁCIÓK

Vannak támpontok, melyek rendszeres kábítószer fogyasztásra utalnak.

Ide tartozik például a viselkedés megváltozása. Aki drogot fogyaszt, gyakran lesz agresszív, vagy érzéketlen. Gyakran kihatással van az iskolai teljesítményre is, ill. a munkateljesítő képességre.

A külvilággal szembeni feltűnő érdektelenség, vagy a saját külső elhanyagolása is lehet a drogfogyasztás jele.

6

Gyanú esetén a drogteszt bizonyosságot ad arról, hogy valóban drogfogyasztás áll-e a háttérben.

Senki nem tudja a gyermekét, vagy partnerét a nap 24 órájában megfigyelni, hogy megbizonyosodjon a drogfogyasztásról, illetve megakadályozhassa azt. Egy ilyen jellegű túlgondoskodás ráadásul sok esetben pont az ellenkezőjét váltja ki ahelyett, mint amit szeretnénk, és a másik fél megfigyelve érzi magát.

Sokkal fontosabb lenne, hogy a gyermekeket ellásák óvó tanácsokkal. A partnerrel a meglévő bizalmi kapcsolatot tovább kellene építeni, és megerősíteni.



HOGYAN SEGÍT A DROGTESZT?

Ideális esetben beszélgetést lehet kezdeményezni, és végül együtt végzik el a tesztet. A drogteszt bizonyossággal kimutatja, hogy gyermeke, vagy partnerre valóban drogot fogyaszt-e.

A drogteszt önellenőrzésre is használható, pl. egy bemutatkozó beszélgetés előtt. Bármikor újra el lehet végezni, egy tartós droggerülő magatartás kimutatása érdekében.


További tanácsot és segítséget a tanácsadó központokban kaphatnak a szenvedélybetegekről.

A DOBOZ TARTALMA

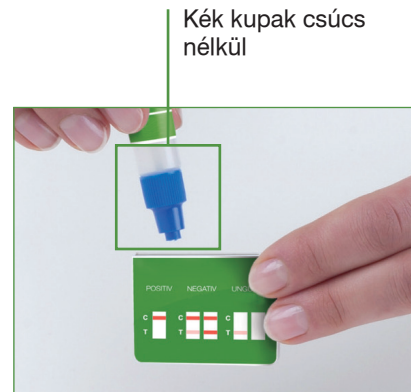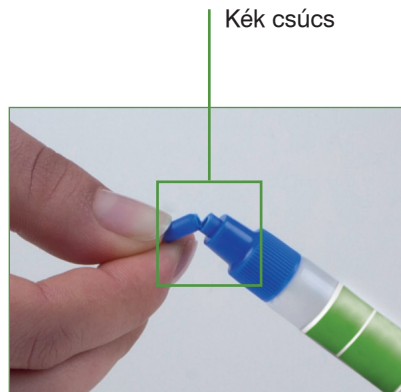


A DOBOZ TARTALMA


Teszt

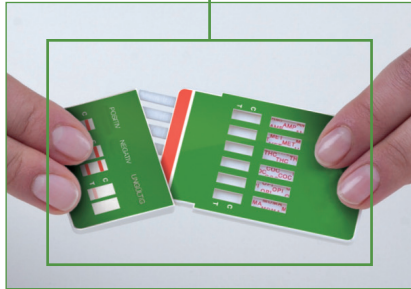

Tesztcsíkok

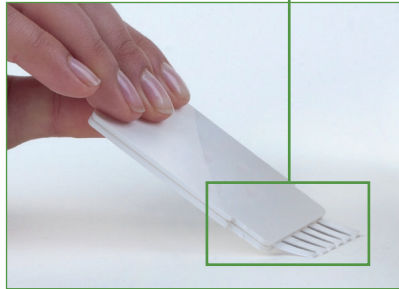

Tesztfedél

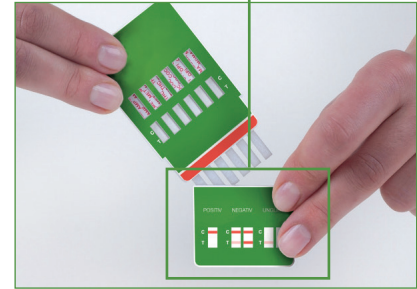

DROGOK KIMUTATÁSA SZILÁRD ANYAGBÓL 1

A drogtest kimentja a szilárd anyagokat, pl. tablettát, hasist, a marihuána növény részét, porokat.

Akinek gyermeke van, annak talán ismerős a következő helyzet:

Az íróasztalon, vagy a hamutartóban olyan anyag található, amit nem tud beazonosítani. Talán az asztalon levő fehér por nyomai is adhatnak okot az aggodalomra.

Hogy megbizonyosodjon arról, hogy a gyermeke, vagy partnere drogot használ, az első lépés egy elbeszélgetés.

Elutasítják? Akkor a drogtest bizonyosságot adhat. Egy bizalomteljes beszélgetés után is szolgálhat a teszt további eljárások alapjául.

DROGOK KIMUTATÁSA SZILÁRD ANYAGBÓL 1

HASZNÁLAT

Elég a legkisebb szemcse, vagy egy sötét morzsa ahhoz, hogy a drogtesztel megkérdőjelezhetően ki lehessen mutatni, hogy drogról van-e szó.

FONTOS

Csak kis mennyiséget vizsgáljon. A tablettákat, ha-sist, vagy a marihuána növényt annyira fel kell da-rabolni, hogy kb. gombostűfej nagyságú legyen a vizsgálandó anyag. Por teszteléséhez szintén elég a kis mennyiség.

A TESZT ELVÉGZÉSE – SZILÁRD ANYAGOK 1A



Vegye ki a folyadékot tartalmazó flakont a dobozból. Csavarja le a kék kupakot. Az ellenőrizendő anyagot rakja bele a flakonba és zárja vissza. Hagyja állni szobahőmérsékleten egy éjszakára, vagy kb. 12 órára (ne fektesse el)!




Következő nap enyhén rázza fel a flakont, hogy minden jól elkeveredjen. Ezután vegye ki a tesztkazettát a fóliából. Vegye le a tesztkazetta fedelét. Helyezze a kazettát egy száraz, tiszta felületre!

A TESZT ELVÉGZÉSE – SZILÁRD ANYAGOK 1A




Vegye le az átlátszó kupakot a flakonról, és törje le a kék csúcsot.

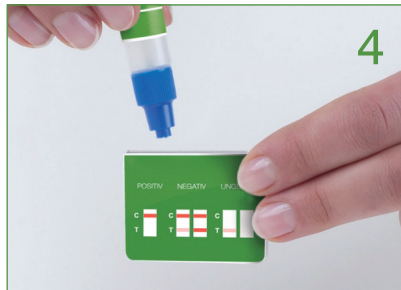

Óvatosan töltsse bele a flakon teljes tartalmát a tesztkazetta fedelébe.

Tipp: Tartsa vízszintesen, hogy elkerülje a folyadék kiömlését.

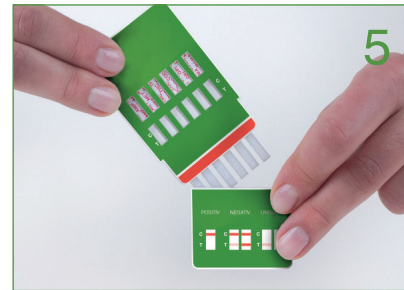

Helyezze a tesztcsíkokat lassan és óvatosan a fedélbe. Az egész tesztet függőlegesen kell tartani, hogy ne folyjon ki a folyadék. Várja ki az 5-8 perces reakcióidőt! Fontos: Az időt pontosan be kell tartani, hogy megfelelő eredményt kapjunk! Az Eredmények fejezetben kiértékelheti saját eredményét.

DROGOK KIMUTATÁSA FOLYADÉKBÓL 2

Útmutató a drogteszt használatához, mellyel ampulában, vagy más tárolóeszközben levő, gyanús jellegű folyadék is kimutatható.

A drogteszt kimutatja a drogot a folyadékban. A parti-drogok, mint a folyékony Ecstasy (GHB – Gamma-Hydroxybutyrát) és az LSD ez alól kivételt képeznek. Nem mutathatók ki a drogtesztel, mivel szintetikus anyagokról van szó.

Sok drog létezik keverékként is, amiket folyadék formában használnak. Ide tartozik pl. az ún. hasis olaj, LSD, folyékony Ecstasy.

Felmerül a gyanú, hogy egy talált üveg, vagy ampulla ilyesmit tartalmaz?

Ha lehet, próbáljon meg bizalomteljes beszélgetést folytatni az üveg tulajdonosával. A drogtesztel végül megbizonyosodhat afelől, hogy a megtalált folyadékban van-e bizonyos koncentráció felett drog.

DROGOK KIMUTATÁSA FOLYADÉKBÓL 2

HASZNÁLAT

Mielőtt a drogtesztet folyadékok teszteléséhez használja, húzzon kesztyűt!

Ezzel elkerüli, hogy a bőrével veszélyes anyagok kerüljenek kapcsolatba. Kerülje a szájba vagy szembe jutást is! Ügyeljen arra, hogy a használat során ne öntsön ki semmit. Ha bármilyen élelmiszer kapcsolatba kerülne a gyanús folyadékkal, feltétlenül ki kell dobni.

FONTOS

Ha az eredmény pozitív, a hordozó folyadékban egy bizonyos drog található. De az, hogy az üveg tulajdonosa valóban fogyasztott-e a drogból, csak egy vizeletvizsgálatból derül ki. Olvassa el hozzá a megfelelő fejezetet.

A TESZT ELVÉGZÉSE – FOLYADÉKOK 2A



Vegye ki a folyadékot tartalmazó flakont a dobozból. Csavarja le a kék kupakot. Tegyen 1-3 cseppet a gyanús folyadékból a flakonba. Csavarja vissza erősen a kupakot, és rázza össze.




Vegye ki a tesztkazettát a fóliából. Vegye le a tesztkazetta fedelét. Helyezze a kazettát egy száraz, tiszta felületre!

A TESZT ELVÉGZÉSE – FOLYADÉKOK 2A




Vegye le az átlátszó kupakot a flakonról, és törje le a kék csúcsot.

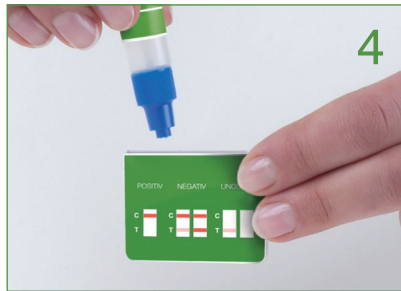

Óvatosan töltsse bele a flakon teljes tartalmát a tesztkazetta fedelébe.

Tipp: Tartsa vízszintesen, hogy elkerülje a folyadék kiömlését.

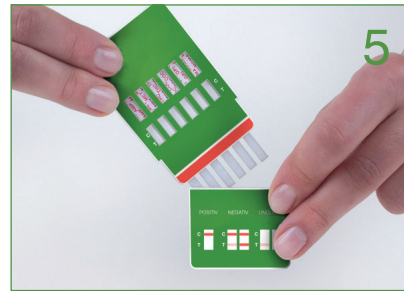

Helyezze a tesztcsíkokat lassan és óvatosan a fedélbe. Az egész tesztet függőlegesen kell tartani, hogy ne folyjon ki a folyadék. Várja ki az 5-8 perces reakcióidőt! Fontos: Az időt pontosan be kell tartani, hogy megfelelő eredményt kapjunk! Az Eredmények fejezetben kiértékelheti saját eredményét.

DROGOK KIMUTATÁSA FELÜLETRŐL 3

Útmutató a drogueszt használatához, mellyel különböző felületekhez (pl. asztalhoz, szekrényhez) tapadt drogmaradványok is kimutathatók.

Akinek az a gyanúja, hogy a gyermeke, vagy a partnere drogot fogyaszt, az jelek után kutat, amik mindent alátámaszthatják. Olyan anyagok adhatnak okot az aggodalomra, melyek első ránézésre nehezen beazonosíthatók, mint pl. fehér por nyoma az asztalon.

Ha a fogyasztó fél figyel rá, hogy ne hagyjon nyomot, és eltitkolja a drogfogyasztást, még nehezebb megbizonyosodni róla. Ahhoz, hogy ez kiderüljön, az első lépés az elbeszélgetés.

Ha elutasítják ezt, és a vizeletvizsgálatot is, a gyors-teszt megoldást nyújthat.

DROGOK KIMUTATÁSA FELÜLETRŐL 3

HASZNÁLAT

A drogteszttel a szemmel nem látható drognymok is kimutathatók. Válassza ki azokat a tesztelni kívánt felületeket, amik a legvalószínűbben kapcsolatba kerülhettek a droggal, pl. asztal, hamutartó, vagy ott heverő tükör. Drognymok olyan felületeken is megtalálhatók, amelyeket a tesztelni kívánt személy rendszeresen megfog, pl. kilincs, iskolatáska, autókormány, távirányító.


FONTOS

Ha az eredmény pozitív, a felületen egy bizonyos drog található. De az, hogy a személy valóban fogyasztott-e a drogból, csak egy vizeletvizsgálatból derül ki egyértelműen. Olvassa el hozzá a megfelelő fejezetet.

A TESZT ELVÉGZÉSE – FELÜLETEK 3A



Vegye ki a tesztkazettát a fóliából. Vegye le a tesztkazetta fedelét.

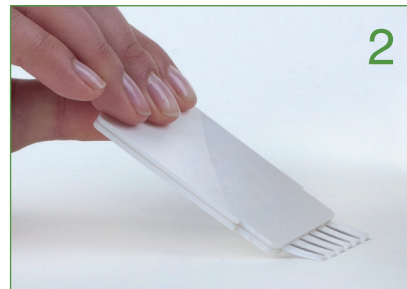


A tesztcsíkok szabad végét húzza végig a gyanús felületeken.

Fontos: A tesztkazetta másik vége mutasson felfelé, hogy a tesztcsíkok hozzáérjenek a felülethez.

A TESZT ELVÉGZÉSE – FELÜLETEK 3A




Vegye le az átlátszó kupakot a flakonról, és törje le a kék csúcsot.

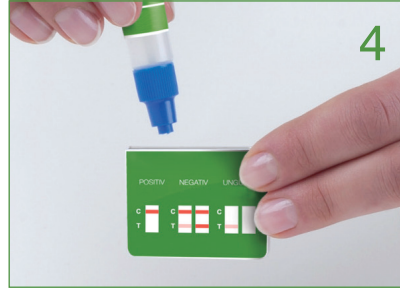

Óvatosan töltsse bele a flakon teljes tartalmát a tesztkazetta fedelébe.

Tipp: Tartsa vízszintesen, hogy elkerülje a folyadék kiömlését.

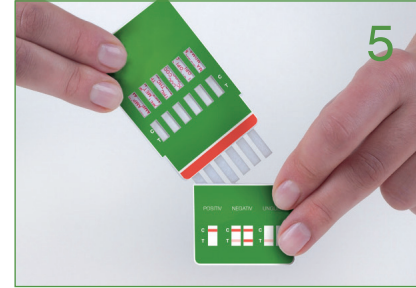

Helyezze bele lassan a fedélbe a kazetta tesztcsíkokat tartalmazó végét. Az egész tesztet függőlegesen kell tartani, hogy ne folyjon ki a folyadék. Várja ki a reakcióidőt, ami 5-8 perc. Fontos: az időtartamot pontosan be kell tartani a megbízható eredmény elérése érdekében. Az Eredmények fejezetben kiértékelheti saját eredményét.

DROGOK KIMUTATÁSA VIZELETBŐL 4 + 4A

ÚTMUTÓ A DROGOK VIZELETBŐL TÖRTÉNŐ KIMUTATÁSÁHOZ

Vizeletből kétséget kizáróan kimutathatók a drogok. Ezért a drogtest számára ez a legpontosabb kimutatási alapanyag. Ahhoz, hogy elkerülje a vizeletminta meghamisítását, ügyeljen rá, hogy a minta adásakor ne történjen csalás. Nem kerülhet más folyadék a pohárba. Tisztítószerek használata is tilos, ugyanis ezek is meghamisíthatják az eredményt. A tesztet elvégző összes személy viseljen kesztyűt, hogy elkerüljék a vizelettel való érintkezést.

22



Vegye ki a fóliából a tesztkazettát. Vegye le a tesztkazetta fedelét. A vizeletfelfogó terület így szabadabbá válik. Helyezze a kazettát egy száraz, tiszta helyre.

A TESZT ELVÉGZÉSE – VIZELET 4A




A vizeletet tartalmazó pohárból vegyen fel vizeletmintát a pipetta segítségével:
Ehhez **lassan** nyomja össze a pipetta tetején található kis hólyagot, megakadályozva ezzel, hogy levegő kerüljön a pipettába. Merítse bele a pipetta **egyenesen tartott** csúcsát a vizeletbe. Csökkentsen a hólyag nyomásán. Ezáltal vizelet kerül a pipettába.



Ha a pipetta megtelik vizelettel, töltsük meg vele a tesztkazetta fedelét. A pipetta teljes tartalmát engedje a fedélbe. **Ismételje meg a folyamatot négyszer.**

Tipp: tartsa vízszintesen a fedelet egy sík felületen, hogy ne loccsanjon ki a vizelet.

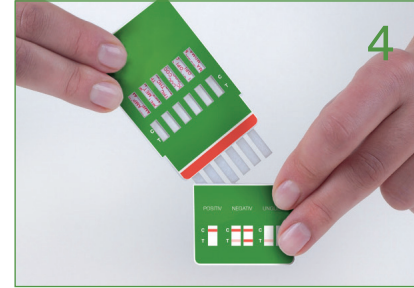

Helyezze bele lassan a fedélbe a kazetta tesztcsíkokat tartalmazó végét. Az egész tesztet függőlegesen kell tartani, hogy ne folyjon ki a vizelet. **Várja ki a reakcióidőt, ami 5-8 perc.** Fontos: az időtartamot pontosan be kell tartani a megbízható eredmény elérése érdekében. Az Eredmények fejezetben kiértékelheti saját eredményét.

DROGOK KIMUTATÁSA VIZELETBŐL 4B

A bevezetőt lásd a 22. oldalon.


A TESZT ELVÉGZÉSE – VIZELET 4B



Vegye ki a fóliából a tesztkazettát. Vegye le a tesztkazetta fedelét. A vizeletfelfogó terület így szabaddá válik. Helyezze a kazettát egy száraz, tiszta helyre.



A pipetta nélküli, közvetlen mintavételhez mártsa függőlegesen a vizeletbe a tesztcsíkokat legalább 10-15 másodpercig. **Ügyeljen rá, hogy a piros vonalat ne érje vizelet.**

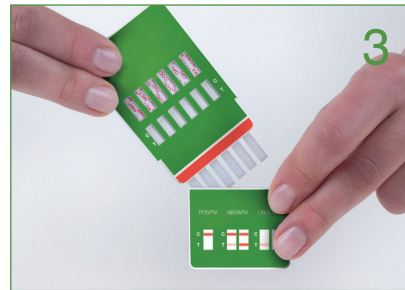

Helyezze bele lassan a fedélbe a kazetta tesztcsíkokat tartalmazó végét. Várja ki a reakcióidőt, ami 5-8 perc. **Fontos: az időtartamot pontosan be kell tartani a megbízható eredmény elérése érdekében.** Az Eredmények fejezetben kiértékelheti saját eredményét.

A TESZT KIÉRTÉKELÉSE

KEDVES VÁSÁRLÓ!

A reakcióidő csak 5-8 percet vesz igénybe. Ezen idő alatt legyen a tesztkazetta végig a fedélben. Végezetül olvassa le az eredményt a tesztcsíkokról.


15 perc elteltével már ne értékelje ki az eredményt.

LEOLVASÁS


A tesztkazetta felső, színes részén 6 ablak található. Itt láthatók a drognevek, amelyek a teszt elvégzése során kiértékelésre kerülnek. Az alattuk levő 6 ablakból (C-vel és T-vel jelölt) kell az eredményt leolvasni.

C-vonal = kontrollvonal. Itt mindenhol meg kell jelennie egy piros csíknak. Ez a jele annak, hogy a teszt megfelelően működik.

T-vonal = tesztvonal. Itt mindegyik droghoz megjelenik a saját eredménye. Ha az eredmény pozitív, a T-nél nem jelenik meg vonal, ez azt jelenti, hogy kétségtelenül kimutatható az adott drog. Negatív eredmény esetén (tehát ha nem mutatható ki egyértelműen a drog) a leolvasó ablakban egy piros vonal látható.

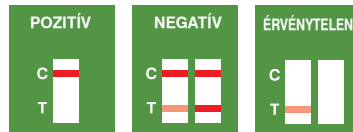

C = kontrollvonal
T = tesztvonal

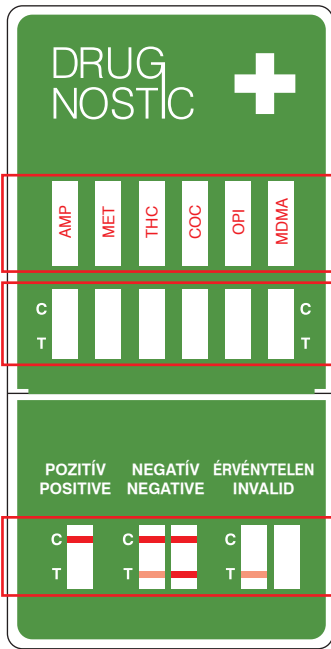

A DROGMEGNEVEZÉSEK RÖVIDÍTÉSEI

Drognév

AMP

amfetamin (pl. speed) 1000 ng/ml

Leolvasó ablak

MET

metamfetamin (pl. pep) 1000 ng/ml

THC

marihuána, hasis (tetrahydrokannabinol)
50 ng/ml

COC

kokain (pl. crack) 300 ng/ml

OPI

ópium, morfium (pl. heroin, ópiát, kodein)
2000 ng/ml

MDMA

ecstasy 500 ng/ml

Eredmény

EREDMÉNY - KIÉRTÉKELÉS

Fontos: a C- és T-vonal intenzitása nagyon eltérő lehet!


C = kontrollvonal

Igazolás, hogy a teszt működik és el lett végezve.

T = tesztvonal


Még a nagyon halvány piros vonalat is ki kell értékelni, mert ez az adott drog mennyiségétől is függ. (mint ahogy a legutolsó drogfogyasztás időpontjától, a fogyasztás gyakoriságától és a drog tisztaságától is)

28

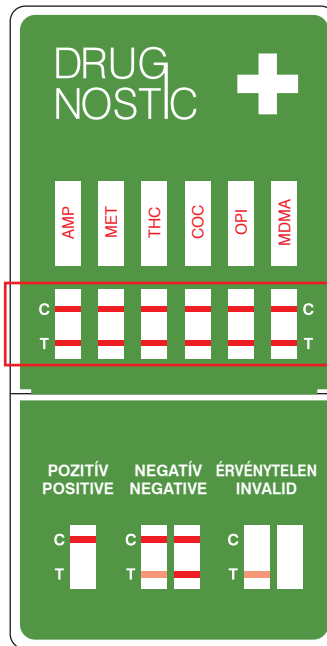


A teszt negatív.

Megjelent a C- és T-vonal is.
Nem mutatott ki drogot.

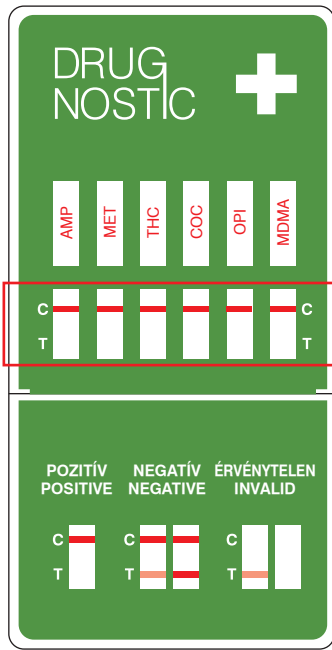


A teszt pozitív.

Csak a C-vonal jelent meg. Kimutatta a drogot.

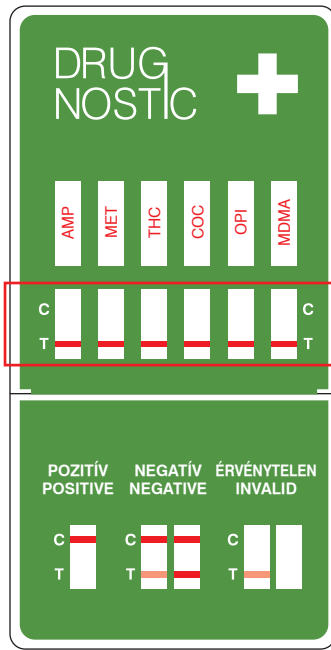




A teszt érvénytelen.


Csak a T-vonal jelent meg. A tesztet meg kell ismételni.

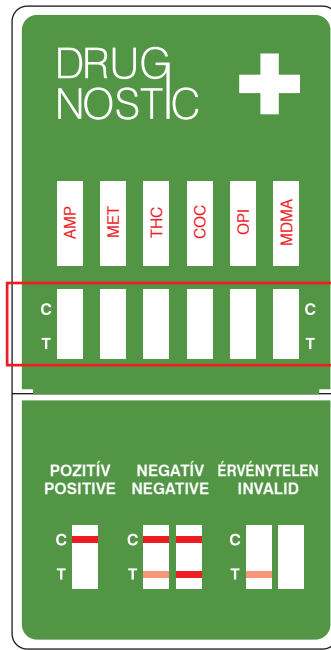

A teszt érvénytelen.

Nem jelent meg egy vonal sem. A tesztet meg kell ismételni.

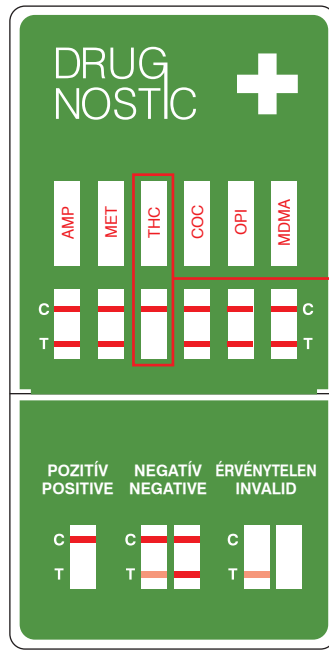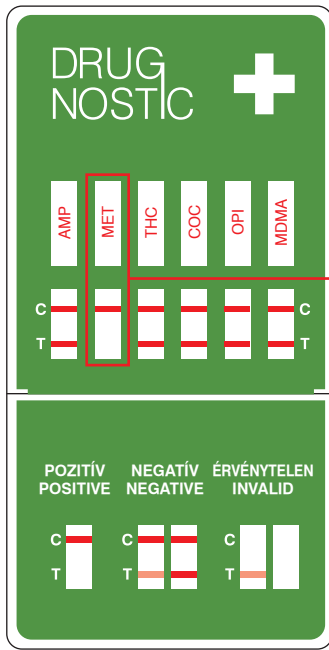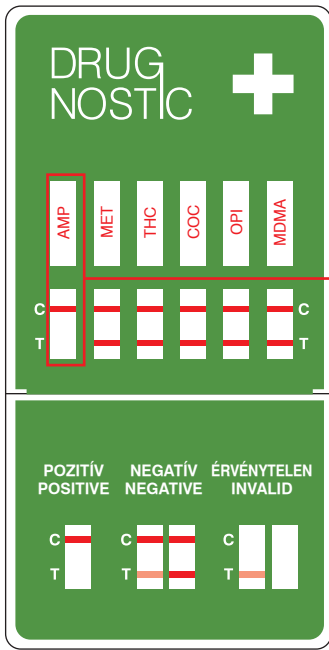


DRUG NOSTIC 

AMP	MET	THC	COC	OPI	MDMA
C	C	C	C	C	C
T	T	T	T	T	T

COC pozitív.
Kokaint mutatott ki.


POZITÍV POSITIVE	NEGATÍV NEGATIVE	ÉRVÉNYTELEN INVALID
C	C	C
T	T	T

DRUG NOSTIC 

AMP	MET	THC	COC	OPI	MDMA
C	C	C	C	C	C
T	T	T	T	T	T

OPI pozitív.
Ópiátot mutatott ki.

POZITÍV POSITIVE	NEGATÍV NEGATIVE	ÉRVÉNYTELEN INVALID
C	C	C
T	T	T

DRUG NOSTIC 

AMP	MET	THC	COC	OPI	MDMA
C	C	C	C	C	C
T	T	T	T	T	T

MDMA pozitív.
Ecstasy-t mutatott ki.

POZITÍV POSITIVE	NEGATÍV NEGATIVE	ÉRVÉNYTELEN INVALID
C	C	C
T	T	T

TARTALOM

2 tesztkazetta 1-1 egyszer használatos pipettával, 1 flakon folyadék, 1 használati útmutató
Szüksége lesz még egy órára és egyszer használatos kesztyűre.

Gyártó: Gecko Pharma Vertrieb GmbH, Germany

Forgalmazó: Semper Pharma Kft.
9023 Győr, Téglavető út 41.

Tel./Fax: 06-96/416-053

E-mail: info@semperpharma.hu
www.semperpharma.hu